

Temporary Cement

TempoSIL® 2

Farklı yüzey ve endikasyonlarda kullanılabilir, polivinil siloksan esaslı TEK bir geçici siman materyali

- Geçici restorasyonların, doğal diş yapısına, kor materyaline, metal alaşımlara ve zirkonyaya güvenilir adezyonunu sağlar
- Uygulaması kolay olduğu gibi, zahmetsiz temizleme sunar
- Hızlı sertleşme süresi
- Estetik uygulamalar için iki renk seçeneği

To TempoSIL 2, farklı yüzeylerde optimum adezyon ve üstün kenar uyumu garanti eder. TempoSIL 2 formülasyonunun sahip olduğu ideal elastisite dengesi sayesinde, fazlalık geçici siman sorunsuz ve zahmetsizce uzaklaştırılabilir. TempoSIL 2, estetik uygulamalar için şimdi 2 değişik renkte de temin edilebilir: *white* ve *dentin*.

Klinik vaka: Geçici restorasyon



Oral Uç yardımıyla TempoSIL 2'yi doğrudan restorasyonun içine uygulayın.



Hafif basınç uygulayarak restorasyonu yerine oturtun.



Restorasyonu 30 - 60 sn. arasında sabit tutun.



Sertleştikten sonra fazlalık TempoSIL 2 simanını uzaklaştırın.



Simante edilmiş geçici restorasyon.

Klinik vaka: Köprü uygulamalarında implant dayanakları



Yerleştirilmiş implant dayanakları.



TempoSIL 2'yi, Oral Ucu kullanarak, doğrudan restorasyonun içine uygulayın.



Hafif basınç uygulayarak zirkonya restorasyonu yerleştirin.




Sertleştikten sonra fazlalık TempoSIL 2 materyalini uzaklaştırın.



Simante edilmiş zirkonya restorasyonu.

Üstün kenar uyumu


TempoSIL 2 ile simante edilmiş, geçici kuronlarda 37 °C sıcaklıktaki suda, 2 hafta sonundaki renk penetrasyonunun karşılaştırmalı değerlendirilmesi.*

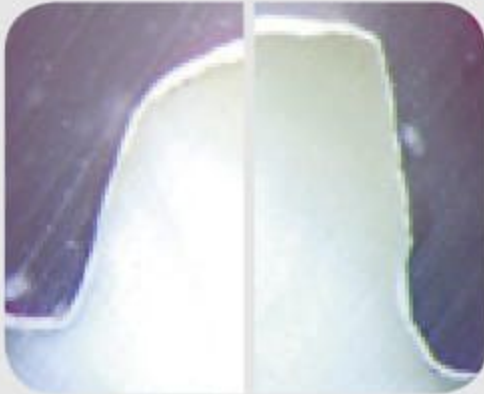

TempoSIL 2'nin üstün kenar uyumu renk penetrasyonunu önler ve suyla silinmeleri en aza indirir.


Güvenilir adezyon

TempoSIL 2'nin yenilikçi formülasyonu farklı yüzeylerde mikro-mekanik retansiyon sağlar.*

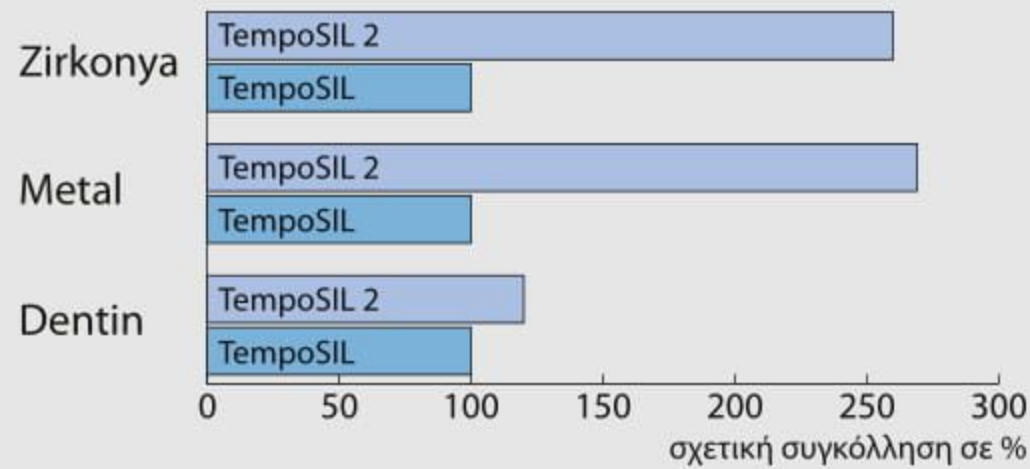

*İçsel ölçüm

Zahmetsiz temizleme

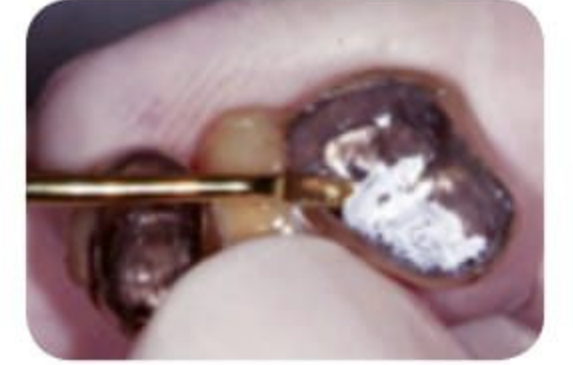

Herhangi bir kalıntı bırakmadan uzaklaştırılabilir.

Sipariş Bilgisi

- 3686 TempoSIL 2 Deneme Paketi**
1 x TempoSIL 2 dentin, 5 ml; 1 x TempoSIL 2 white, 5 ml
15 x Mixing Tips Brown long fine
- 6727 TempoSIL 2 dentin Tanıtım Kiti**
2 x TempoSIL 2 dentin, 5 ml; 15 x Mixing Tips Brown long fine
- 6729 TempoSIL 2 white Tanıtım Kiti**
2 x TempoSIL 2 white, 5 ml; 15 x Mixing Tips Brown long fine

- 6728 TempoSIL 2 dentin Tekrar Dolum**
4 x TempoSIL 2 dentin, 5 ml
- 6730 TempoSIL 2 white Tekrar Dolum**
4 x TempoSIL 2 dentin, 5 ml
- 6749 Karıştırma Ucu/Oral Uç**
40 x Mixing Tips Brown long fine

www.coltenewhaledent.com
© 2011 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent